



Caneta para marcação cirúrgica

Nome Comercial: **LEVERMARK**®


Isto de Registro da ANVISA

Produto de uso único (Recomendação do Fabricante)

Prazo de validade: **3 anos**

Produto estéril - Óxido de Etileno

Não reprocessar - Pronto uso

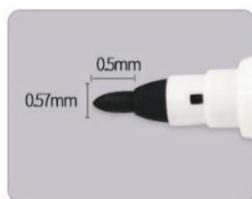

Fiber NIB



Ventilated Cap



Indicação

O produto é de uso exclusivo na marcação de pele de pacientes antes das cirurgias. **USO MÉDICO**

Orientações / Precauções

- ▶ Verificar o estado da embalagem, do produto e o prazo de validade;
- ▶ A esterilização do produto está garantida desde que a embalagem do produto esteja em pleno estado de conservação;
- ▶ Não utilizar a mesma caneta para marcação cirúrgica em diferentes pacientes, prevenindo infecções. Utilizar cuidadosamente em feridas da mucosa.

Instruções de uso

- ▶ Faça a higienização do local de aplicação da caneta e depois seque a área;
- ▶ Aguarde por cerca de 1 minuto para fixação da tinta antes de esfregar ou aplicar a solução antisséptica para preparação;
- ▶ Descarte a caneta junto com os materiais cirúrgicos gerais.

Composição da tinta - Violeta de Genciana

Importador: Lever Medical Materiais Hospitalares Eireli - CNPJ: 40.758.730/0001-70

End: Rua Teodoro Sampaio, 1020 - sala 1109 Pinheiros, São Paulo, SP, 05406-050

Telefone: +55 11 95592-5137 - Email: comercial@levermedical.com.br

Responsável técnico: Márcio Cerqueira CRF-SP105680

Para conhecer mais
produtos e instruções de uso
www.levermedical.com.br