



Borrifador descartável para lidocaína

Isento de Registro da ANVISA

Resp. técnico: Márcio Cerqueira CRF-SP105680

Produto de uso único (Recomendação do Fabricante)

Prazo de validade: **3 anos**

Produto embalado individualmente em sala limpa

Não reprocessar - Pronto uso

Mais informações

Comprimento: **12cm** / Peso: **2g**

1 borrifacada = **0,1 ml**

Encaixe universal para frasco spray

Aplicação externa ou interna



Indicação

O produto é indicado para borrifar soluções medicamentosas líquidas. **USO MÉDICO**

Orientações / Precauções

- ▶ Verificar o estado da embalagem, do produto e o prazo de validade;
- ▶ A esterilização do produto está garantida desde que a embalagem do produto esteja em pleno estado de conservação;
- ▶ O borrifador é um produto de uso único. Sua utilização individualizada previne infecções e risco de contaminação dentro do ambiente hospitalar.

Instruções de uso

- ▶ Conectar o borrifador na válvula do frasco do medicamento;
- ▶ Verificar se o mesmo está conectado corretamente;
- ▶ Borrifar a solução medicamentosa na mucosa do paciente;
- ▶ Descartar o borrifador junto com os materiais cirúrgicos gerais.